



Kommunförbundet Skåne

Produktguide för
antidecubitus

Madrasser

From 2019-03-01

Kommunförbundet
Skånes sortiment

Innehåll

1. Standardmadrass	2
Optimal 5zon	2
2. Standardmadrass med hög brukarvikt	3
Dacapo Heavy User Light	3
3. Bäddmadrass	4
Optimal 5zon BM	4
4. Tryckfördelande toppmadrass med pump	5
CuroCell S.A.M. PRO CF	5
5. Tryckfördelande hybridmadrass	6
CuroCell AREA Zone	6
6. Tryckavlastande toppmadrass med pump	7
OptiCell 3NX	7
7. Tryckavlastande ersättningsmadrass med pump	8
CuroCell AUTO420	8

1. Standardmadrass

ISO-kod 043306

Användningsområde: Madrass som placeras i kommunernas vårdsängar i ordinärt alternativt särskilt boende.

Optimal 5zon

Leverantör: Care of Sweden

www.careofsweden.se

Beskrivning av madrass

Optimal 5zon är en tryckfördelande madrass som är förebyggande vid behandling av trycksår till och med kategori 2. Madrassens kärna är kallskum med densitet 65+50kg/m³. Det är en mjuk och flexibel kombimadrass som placeras direkt på sängbotten. Optimal 5zon erbjuder goda tryckfördelande egenskaper och är utrustad med sittfunktion DuoCore. Sittfunktionen är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge. Madrassen levereras med hygienöverdrag inklusive evakueringshandtag. Optimal 5zon är en stabil madrass när brukaren har förmågan att utföra förflyttningar självständigt.

Skötsel

Hygienöverdraget ångandas och går att torkas av med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.

Hygienöverdragets överdel kan separeras från underdelen och tvättas separat. Maskintvätta max 95 grader och torktumla. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.

Max brukarvikt: 180kg

Höjd 14cm. Upphandlade bredder 85, 90, 105 och 120cm. Längd 200cm

Pris: 2990:-



Bild: Care of Sweden



2. Standardmadrass med hög brukarvikt

ISO-kod 043306

Användningsområde: Madrass som placeras i kommunernas vårdsängar i ordinärt alternativt särskilt boende.

Dacapo Heavy User Light

Leverantör: Invacare

www.invacare.com

Beskrivning av madrass

Dacapo Heavy User Light är en madrass som är uppbyggd för att möta tyngre brukares behov och förebyggande vid behandling av trycksår till och med kategori 2. Madrassen är uppbyggd av tre skikt skum med densitet 50+38+50 kg/m³. Det undre skiktet består av högelastiskt skum som upprätthåller madrassens stabilitet. Det mittersta skiktet även det av högelastiskt skum fast något mjukare. Det övre skiktet är av viscoelastiskt skum som ger god tryckfördelning och komfort. Madrassen levereras med hygienöverdrag. Dacapo Heavy User Light är en stabil madrass när brukaren har förmåga att utföra förflyttningar självständigt.

Skötsel

Hygienöverdraget ångandas och går att torkas av med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Överdraget kan maskintvättas i 95 grader och torktumlas. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.

Max brukarvikt: 250kg

Höjd: 15cm Upphandlade storlekar 90x200cm, 105x200cm samt 116x205cm

Pris: 2145:-

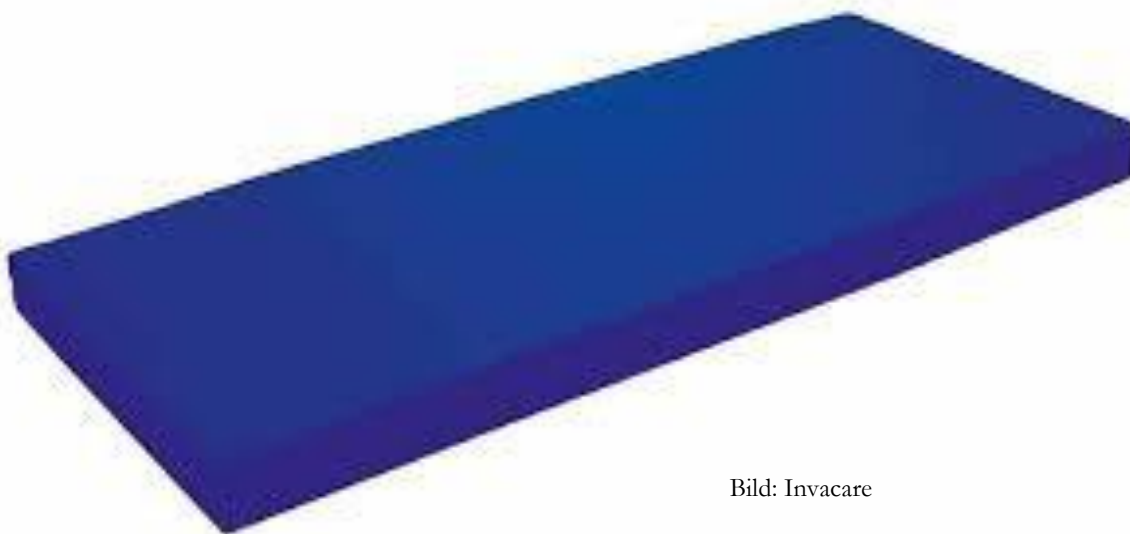


Bild: Invacare



3. Bäddmadrass

ISO-kod 043306

Användningsområde: Bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass i säng med resårmatrass.

Optimal 5zon BM

Leverantör: Care of Sweden

www.careofsweden.se

Beskrivning av madrassen

Optimal 5zon BM är en tryckfördelande madrass som är förebyggande vid behandling av trycksår till och med kategori 2. Madrassen kärna är kallsaum densitet 65kg/m³. Madrassen är mjuk och följsam och ska placeras ovanpå befintlig madrass. Optimal 5zon BM levereras med hygienöverdrag som har fästband i resår.

Skötsel

Hygienöverdraget ångandas och går att torkas av med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätta max 95 grader och torktumla. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.

Max brukarvikt:150kg

Höjd 6cm. Upphandlade bredder 80, 90, 105, och 120cm. Längd 200cm

Pris: 1390:-



Bild: Care of Sweden



4. Tryckfördelande toppmadrass med pump

ISO-kod: 043306

Användningsområde: Toppmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass i vårdsäng eller säng med resår madrass

CuroCell S.A.M. PRO CF

Leverantör: Care of Sweden

www.careofsweden.se

Beskrivning av madrass

CuroCell S.A.M. PRO CF är en statisk bäddmadrass som används förebyggande vid behandling av trycksår till och med kategori 3. Madrassen består av luftceller som är kopplade mellan varandra. Mellan cellerna och överdraget finns ett mjukt inneröverdrag som ökar komforten. Pumpen bibehåller automatiskt vald tryck- och komfortnivå. Det innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs, vilket minskar ljud och vibrationer. Pumpen larmar vid fel som lågt lufttryck i madrassen. Madrassen levereras med hygienöverdrag med fästband i resår. Väska ingår. Madrassen ska ha en undermadrass (minst 6cm) vid placering i vårdsäng.

Skötsel

Installation av madrassen tar ca 20 minuter. Pumpen har ett komfortreglage som ställs in efter brukarens vikt, se bruksanvisningen. Handcheck ska göras. Hygienöverdraget ångandas och går att torkas av med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätta max 95 grader och torktumla. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.

Max brukarvikt: 250 kg

Höjd: 10 cm. Upphandlade bredder 80, 85, 90 och 105 cm. Längd 200 cm.

Pris: 5890:-

Tillbehör: Undermadrass Prima 6. Pris: 790:-



Bild: Care of Sweden

5. Tryckfördelande hybridmadrass

ISO-kod: 043306

Användningsområde: Madrass som placeras direkt på sängbotten i kommunens vårdsäng i särskilt eller ordinärt boende.

CuroCell AREA Zone

Leverantör: Care of Sweden

www.careofsweden.se

Beskrivning av madrass

Tryckfördelande och självinställande madrass i kombination av luft och skum för behandling av trycksår upptill kategori 3. Madrassen har ingen pump utan anpassar sig automatiskt till brukaren och ger en individuell inställning. Madrassen har en skumkärna som är lägre vid fötterna vilket reducerar trycket mot hämlarna. De nio luftcellerna är fyllda med skum och är kopplade mellan varandra i ett slutet system. Överst ligger det en bäddmadrass Optimal 5 zon. Madrassen levereras med ett hygienöverdrag. Väska ingår. CuroCell Area Zone är en stabil madrass när brukaren har förmågan att utföra förflyttningar självständigt.

Skötsel

Ingen installation och inget underhåll krävs. Lägg direkt på sängbotten och är klar att användas efter några minuter. Handcheck ska göras. Hygienöverdraget ångandas och går att torkas av med rengörings-och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätta max 95 grader och torktumla. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.

Max brukarvikt: 230kg

Höjd: 18 cm. Upphandlade bredder 80, 85, 90 och 105 cm. Längd 200 cm.

Pris: 6890:-



Bild: Care of Sweden

6. Tryckavlastande toppmadrass med pump

ISO-kod: 043306

Användningsområde: Toppmadrass som placeras ovanpå befintlig resårmatrass i ordinär säng (alternativt ovanpå undermadrass i vårsäng).

OptiCell 3NX

Leverantör: Järven Health Care

www.jarven.se

Beskrivning av madrass

Tryckavlastande madrass med luftväxlande automatisk pump vid behandling av trycksår upptill kategori 4. Toppmadrass som kräver undermadrass typ skummadrass eller resårmatrass. Madrassen ställer automatiskt in sig efter brukarens vikt, läge och position. Pumpen kan ställas in så att madrassen blir både luftväxlande eller statisk. Genom att ta bort enskilda celler kan total avlastning ges till specifika kroppsdelar. Omvårdnadsläge som efter 30 minuter automatiskt återgår till växlande läge. Madrassen kan ställas i transportläge och behåller maximalt lufttryck i minst 12 timmar. Inställning av komfort finns. Madrassen levereras med hygienöverdrag med fästband i resår. Väska ingår.

Skötsel

Installation av madrassen tar ca 15 minuter. Handcheck krävs. Överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och kan även maskintvättas i 95 grader. För att rengöra pumpen använd våt trasa och mildt rengöringsmedel för pumphus och esladd. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.

Max brukarvikt: 230 kg

Höjd: 13cm Upphandlade bredder: 80,85, 90 och 105cm

Längd 200cm

Pris: 7380:-

Tillbehör: Undermadrass Mellissa Basic Pris: 868:-



Bild: Järven

7. Tryckavlastande ersättningsmadrass med pump

ISO-kod 043306

Användningsområde: Ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten i kommunernas vårdssängar i särskilt eller ordinärt boende.

CuroCell AUTO420

Leverantör: Care of Sweden

www.careofsweden.se

Beskrivning av madrass

Tryckavlastande madrass med luftväxlande automatisk pump vid behandling av trycksår upptill kategori 4. Placeras direkt i vårdssäng utan undermadrass. Vid behov av grindar behövs grindförhöjning.

Ställer in sig efter brukarens vikt, läge och position. Pumpen kan ställas in så att madrassen blir både luftväxlande eller statiskt lågt tryck. Omvårdnadsläge 30 minuter som automatiskt återgår till förinställt läge.

Madrassen kan ställas i transportläge och behåller maximalt lufttryck i ca 3 timmar. Inställning av komfort finns.

Madrassen levereras med hygienöverdrag. Väska ingår.

Skötsel

Installation av madrassen tar ca 30 minuter. Handcheck krävs. Överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel och kan även maskintvättas i 95 grader. För att rengöra pumpen använd våt trasa och mildt rengöringsmedel för pumphus och dsladd. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.

Max brukarvikt: 250 kg

Höjd: 20 cm Upphandlade bredder: 80, 85, 90, 105cm

Längd:200cm

Pris: 13 900:-



Bild: Care of Sweden

Snabbguide antidecubitusmadrasser KFSK 2019

Optimal 5Zon

Care of Sweden

Optimal 5Zon BM

Care of Sweden

Dacapo Heavy User Light

Invacare

Curocell Area Zone

Care of Sweden

	Optimal 5Zon	Optimal 5Zon BM	Dacapo Heavy User Light	Curocell Area Zone
Pris	2990:-	1390:-	2145:-	6890:-
Funktion	Tryckfördelande skummadrass utan pump	Tryckfördelande skummadrass OBS! Bäddmadrass	Tryckfördelande skummadrass utan pump	Tryckfördelande och självinställande madrass i kombination av luft och skum (hybrid). Madrassen har ingen pump utan anpassar sig automatiskt till patienten och ger en individuell inställning.
Sårkategori	Förebyggande och behandlande av trycksår till och med kategori 2	Förebyggande och behandlande av trycksår till och med kategori 2	Förebyggande och behandlande av trycksår till och med kategori 2	Förebyggande och behandlande av trycksår till och med kategori 3
Riskbedömning - Klinisk bedömning - Hudbedömning - Modifierad Nortonskala	Patient med låg till medelhög risk att utveckla trycksår	Patient med låg till medelhög risk att utveckla trycksår	Patient med låg till medelhög risk att utveckla trycksår	Patient med medelhög till hög risk att utveckla trycksår
Viktinställning	Nej	Nej	Nej	Nej
Brukarvikt	0-180 kg	0-150 kg	40-250 kg	0-230 kg
Topp- / ersättningsmadrass	Ersättningsmadrass Kombimadrass som placeras direkt på vårdssängens botten	Toppmadrass Bäddmadrass som placeras ovanpå en befintlig madrass.	Ersättningsmadrass Kombimadrass som placeras direkt på vårdssängens botten	Ersättningsmadrass Madrassen placeras direkt på vårdssängens botten.
Höjd på madrass	14 cm	6 cm	15 cm	18 cm
Bredder på madrass (cm)	85, 90, 105, 120	80, 90, 105	90, 105, 116	80, 85, 90, 105
Omvårdnadsläge	Nej, ej relevant	Nej, ej relevant	Nej, ej relevant	Nej, ej relevant

Snabbguide antidecubitusmadrasser KFSK 2019

Curocell S.A.M PRO CF
Care of Sweden

OptiCell 3NX
Järven

Curocell AUTO 420
Care of Sweden

Pris	5890:-	7380:-	13 900:-
Funktion	Tryckfördelande statisk toppmadrass med luft och pump	Tryckfördelande och tryckavlastande luftmadrass. Arbetar enligt växeltrycksprincipen eller med ett konstant lågt tryck	Tryckavlastande eller tryckfördelande luftmadrass. Arbetar enligt växeltrycksprincipen eller med ett konstant lågt tryck
Sårkategori	Förebyggande och behandlande av trycksår till och med kategori 3	Förebyggande och behandlande av trycksår till och med kategori 4	Förebyggande och behandlande av trycksår till och med kategori 4
Riskbedömning <input type="checkbox"/> Klinisk bedömning <input type="checkbox"/> Hudbedömning <input type="checkbox"/> Modifierad Nortonskala	Patient med medelhög risk att utveckla trycksår	Patient med mycket hög risk att utveckla trycksår	Patient med mycket hög risk att utveckla trycksår
Viktinställning	Manuell	Automatisk	Automatisk
Brukarvikt	0-250 kg	0-230 kg	0-250 kg
Topp- / ersättningsmadrass	Toppmadrass Placera madrassen ovanpå en annan madrass, som är minst 6 cm hög, och fäst resårbanden runt den underliggande madrassen. OBS! Var extra uppmärksam på att resårbanden fästs ordentligt runt den underliggande madrassen. Den underliggande madrassen bör inte vara tjockare än 22 cm för att resårbanden ska räckas till.	Toppmadrass Placera madrassen ovanpå en annan madrass, som är minst 5 cm hög, och fäst resårbanden runt den underliggande madrassen. OBS! Var extra uppmärksam på att resårbanden fästs ordentligt runt den underliggande madrassen. Den underliggande madrassen bör inte vara tjockare än 22 cm för att resårbanden ska räckas till.	Ersättningsmadrass Kombimadrass som placeras direkt på sängbotten. Fäst madrassen mot sängen med banden på madrassens undersida. OBS! Madrassen bör ligga på ett fast underlag.
Höjd på madrass	10 cm	13 cm	20 cm
Bredder på madrass (cm)	80, 85, 90, 105	80, 85, 90, 105	80, 85, 90, 105
Omvårdnadsläge	Ja, automatisk återgång efter 30min	Ja, automatisk återgång efter 30min	Ja, automatisk återgång efter 30min

